

BAREVNÉ MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY**BALENÍ OBSAHUJE**

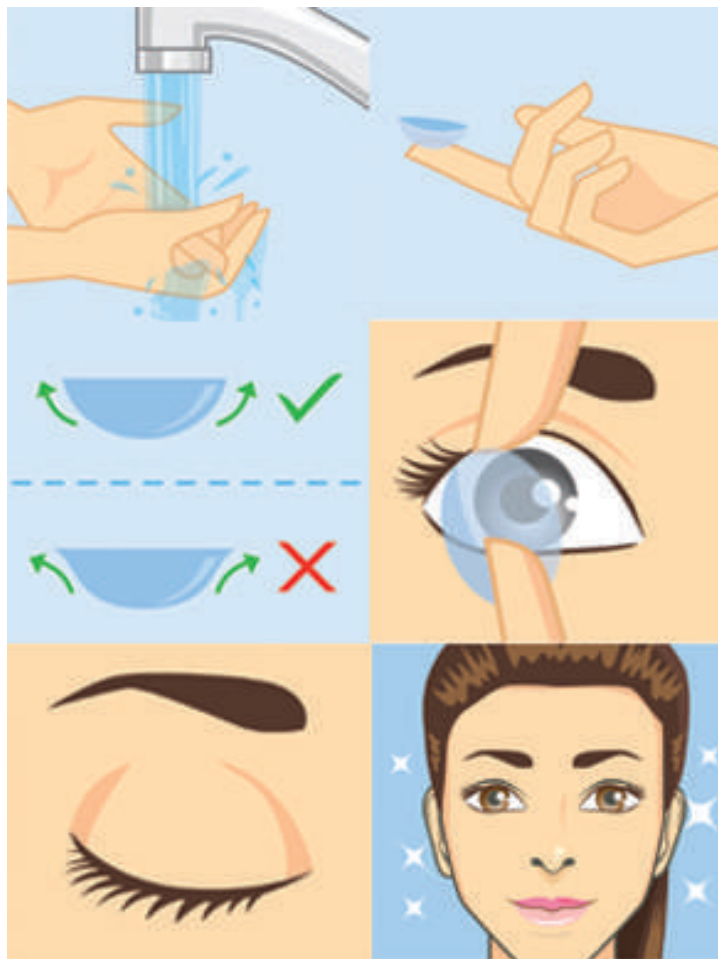
1x měkké kontaktní čočky

**ČAS NOŠENÍ**

Kontaktní čočky jsou vhodné k nošení ve dne. Při prvním nošení můžete pocítit lehké nepohodlí, které odezní, až se vaše oči postupně přizpůsobí kontaktním čočkám. Začněte s maximálním časem nošení do čtyř hodin a postupně jej zvyšujte o dvě hodiny denně, až se dostanete na 12 hodin. Nespěte s kontaktními čočkami, mohli byste si trvale poškodit oči.

POUŽITÍ

- Nejprve si důkladně umyjte a osušte ruce.
- Otevřete pouzdro s kontaktními čočkami a konečky prstů vezměte první kontaktní čočku do nedominantní ruky.
- Omyjte čočku roztokem na kontaktní čočky. Nikdy nepoužívejte obyčejnou vodu.
- Dejte si čočku na špičku ukazováčku nebo prostředníčku dominantní ruky.
- Zkontrolujte, že čočka není poškozená a že míří správnou stranou nahoru. Hrany kontaktní čočky by měly mířit vzhůru a tvořit miskou, neměly by se vyklápět. Pokud je čočka naruby, jemně ji převraťte. Pokud je čočka poškozená, nepoužívejte ji.
- Podívejte se do zrcadla a rukou, ve které nemáte čočku, si podržte otevřená horní a spodní oční víčko.
- Dívejte se před sebe nebo ke stropu a dejte si kontaktní čočku do oka.
- Pomalu zavřete oko a protočte oči nebo jemně zatlačte na víčko, aby se čočka usadila.
- Čočka by vám měla být pohodlná, po zamrkání byste měli vidět jasně. Pokud vám je čočka nepříjemná, jemně ji vyjměte z oka, opláchněte ji a zkuste to znovu.
- Zopakujte postup s druhou čočkou.
- Pro vyndání: nejprve si umyjte ruce. Široce otevřete oční víčka, jako když jste si čočku nasazovali, zatlačte bříškem prstu, ne nehtem, na spodní část čočky a pomalu a jemně ji vyndejte.

**VEDLEJŠÍ ÚČINKY**

Pokud se o čočky nebudete dobře starat, můžete pak v očích cítit pálení, svědění a nepříjemný pocit. Může to nastat při nemocích očí. Pokud se cítíte nepříjemně, kontaktujte svého lékaře.

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

- Pokud si nebudete brzy nasazovat čočky, uchovejte je v zavěšeném pouzdru na kontaktní čočky. Neskladujte čočky v obyčejném solném roztoku, nebude fungovat jako dezinfekce. Čočky můžete uchovávat v neotevřeném pouzdru, dokud si je nebudete chtít nasadit, a to maximálně 30 dní.
- Nepoužívejte znovu starý roztok ani nedoplňujte roztok v pouzdru na kontaktní čočky.
- Nepřemisťujte roztok na kontaktní čočky do menších nádob na cestování. Ovlivní to sterilitu roztoku, což může vést k infekci očí.
- Braňte kontaktu vršku lahve s roztokem a jakýmkoli povrchem, mimo použití udržte lahev pevně zavěšenou.
- Pokud skladujete čočky v pouzdru prodlouženou dobu, podívejte se na instrukce ke kontaktním čočkám nebo k jejich roztoku, abyste určili, jestli je vhodné je před nošením znovu dezinfikovat. V žádném případě byste neměli čočky nosit po skladování a 30 opakování dezinfekce.

VAROVÁNÍ

- Tento produkt je v přímém kontaktu s rohovkou, před použitím prosím kontaktujte lékaře. Pokud dojde k jakýmkoli problémům, řešte je okamžitě, abyste se vyhnuli trvalému poškození zraku.
- Noste čočky přesně podle Času nošení a nenoste denní kontaktní čočky při spánku.
- Pokud je balení jakkoli poškozené, **NEPOUŽÍVEJTE** čočky!
- Nevyměňujte čočky, vždy noste v jednom oku tu samou. Pravá čočka patří vždy do pravého oka, obdobě s levou.
- Nespěte a neplavte během využívání kontaktních čoček. Nesdílejte je s jinými osobami.

ZÁRUKA

- Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete reklamovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, a můžete požádat o náhradu zdarma nebo o vrácení peněz za nevyhovující produkt.
- Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data jeho obdržení.

**KONTAKT**

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko.