

## WELCHES PAKET ENTHÄLT

- 1x weiche Kontaktlinsen




## TRAGEZEITABELLE ⚠

Die Linsen sind tagestauglich. Beim ersten Tragen können Sie ein leichtes Unbehagen verspüren, das nachlässt, wenn Sie Ihre Augen langsam an die Linsen gewöhnen. Beginnen Sie mit maximal vier Stunden und erhöhen Sie dann jeden Tag um zwei Stunden, bis Sie auf 12 Stunden kommen. Bitte schlafen Sie nicht mit den Kontaktlinsen, Sie können Ihre Augen dauerhaft schädigen.

## EINSATZHINWEISE

- Waschen Sie sich zunächst gründlich die Hände und trocknen Sie sie gut ab.
- Öffnen Sie Ihren Kontaktlinsenbehälter und setzen Sie die erste Kontaktlinse mit der Fingerspitze in Ihre nicht dominante Hand ein.
- Spülen Sie die Linse mit Kontaktlinsenflüssigkeit ab. Verwenden Sie niemals normales Wasser.
- Setzen Sie die Linse auf die Oberseite des Zeige- oder Mittelfingers Ihrer dominanten Hand.
- Vergewissern Sie sich, dass die Linse nicht beschädigt ist und dass die richtige Seite nach oben zeigt. Die Ränder der Linse sollten nach oben zeigen und eine Schale bilden, nicht nach außen klappen. Wenn sie nach außen zeigt, drehen Sie sie vorsichtig um. Wenn die Linse beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht.
- Schauen Sie in den Spiegel und halten Sie Ihr oberes und unteres Augenlid mit der Hand offen, die nicht die Linse hält.
- Schauen Sie vor sich oder nach oben zur Decke und setzen Sie die Linse in Ihr Auge.
- Schließen Sie Ihr Auge langsam und rollen Sie entweder mit dem Auge herum oder drücken Sie leicht auf das Augenlid, um die Linse in Position zu bringen. Die Linse sollte sich angenehm anfühlen, und Sie sollten nach ein paar Mal Blinzeln klar sehen können. Wenn sie sich nicht angenehm anfühlt, nehmen Sie die Linse vorsichtig heraus, spülen Sie sie ab und versuchen Sie es erneut.

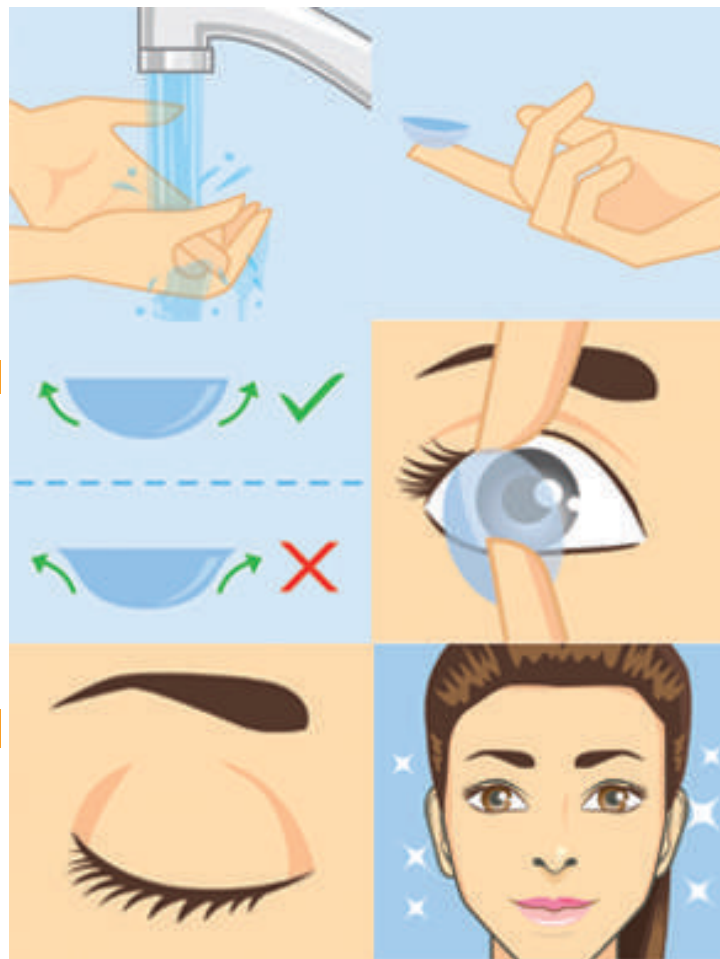

## NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie die Linsen nicht pflegen, können sie ein brennendes, juckendes und unangenehmes Gefühl in den Augen verursachen. Dies kann zu Augenkrankheiten führen. Wenn Sie irgendwelche Beschwerden verspüren, gehen Sie bitte zu Ihrem

## PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie die Kontaktlinsen nicht sofort tragen, bewahren Sie sie in einem geschlossenen Linsenbehälter auf. Lagern Sie Ihre Linsen nicht in einfacher Kochsalzlösung. Kochsalzlösung ist nicht desinfizierend. Die Linsen können im ungeöffneten Behälter bis zum Tragen aufbewahrt werden, maximal 30 Tage.
- Verwenden Sie keine alte Lösung wieder und füllen Sie die Lösung in Ihrem Linsenbehälter nicht auf.
- Füllen Sie Kontaktlinsenflüssigkeit nicht in kleinere Behälter in Reisegröße um. Dies kann die Sterilität der Lösung beeinträchtigen, was zu einer Augeninfektion führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Spitze der Lösungsflasche nicht mit einer Oberfläche in Berührung kommt, und halten Sie die Flasche fest verschlossen, wenn sie nicht benutzt wird.
- Wenn Sie Ihre Linsen über einen längeren Zeitraum im Etui aufbewahren, konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung der Linsen oder der Kontaktlinsenflüssigkeit, um festzustellen, ob eine erneute Desinfektion der Linsen vor dem Tragen der Linsen angebracht ist. Auf keinen Fall sollten Sie Ihre Linsen nach der Lagerung für 30 Re-Desinfektion tragen.

## WARNUNG

- Dieses Produkt steht in direktem Kontakt mit der Hornhaut, bitte sprechen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt. Falls Probleme auftreten, bitte sofort behandeln, um dauerhafte Sehschäden zu vermeiden.
- Tragen Sie die Linsen strikt nach - Tragezeitabelle und tragen Sie die Tageslinsen nicht während des Schlafes.
- Wenn die Verpackung in irgendeiner Weise beschädigt ist, NICHT VERWENDEN!
- Tauschen Sie die Linsen nicht aus, verwenden Sie immer die gleiche Linse im gleichen Auge. Die rechte Linse muss immer in das rechte Auge, die linke in das rechte Auge.
- Während der Verwendung der Kontaktlinsen nicht schlafen oder schwimmen. Nicht mit anderen teilen.

## GARANTIE

- Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des ungeeigneten Produkts verlangen.
- Senden Sie uns eine E-Mail mit der Bestellnummer und dem Kaufdatum. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.



## KONTAKT

E-Mail: support@d4web.eu  
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien.