

LENTILE NOI COLORATE

CE INCLUDE PACHETUL

- 1x lentile moi de contact




ORAR DE PURTARE ⚠

Lentilele se pot purta pe timpul zilei. Când le purtați pentru prima dată, e posibil să simțiți un disconfort, dar va trece pe măsură ce ochii se adaptează lentilelor. Începeți cu maximul patru ore și apoi creșteți timpul cu 2 ore în fiecare zi până ajungeți la 12 ore. Vă rugăm nu dormiți cu lentilele, vă puteți dauna ochii permanent.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Prima dată, spălați-vă pe mâini bine și uscați-le bine.
- Deschideți cutia cu lentilele de contact și cu indexul puneți prima lentilă în mâna dvs. ne dominantă.
- Clătiți lentila cu soluție pentru lentile de contact. Nu folosiți niciodată apă normală.
- Puneți lentila pe vârful indexului sau a degetului mijlociu a mâinii dvs. dominante.
- Verificați pentru a vă asigura că lentilele nu s-au răsturnat și că orientarea ei e corectă.
- Marginile lentilei ar trebui să formeze un bol. Dacă e inversă, o puteți întoarce ușor. Dacă lentila e deformată, nu o folosiți.
- Priviți în oglindă și țineți pleoapele deschise cu mâna cu care nu țineți lentila.
- Priviți în față sau spre tavan și așezați lentila în ochi.
- Închideți ochiul ușor și mișcați puțin ochiul sau apăsați ușor pe pleoapă pentru a fixa lentila. Lentila ar trebui să fie confortabilă și ar trebui să puteți vedea clar după ce clipiți de câteva ori. Dacă nu e confortabilă, o puteți scoate afară, o clătiți și apoi încercați din nou.
- Repetați procesul cu a doua lentilă.
- Pentru a le scoate: prima dată spălați-vă mâinile. Întindeți pleoapele la fel ca atunci când le-ați pus, trageți de marginea lentilei cu degetul dvs., nu cu unghii și îl scoateți ușor și gentil.

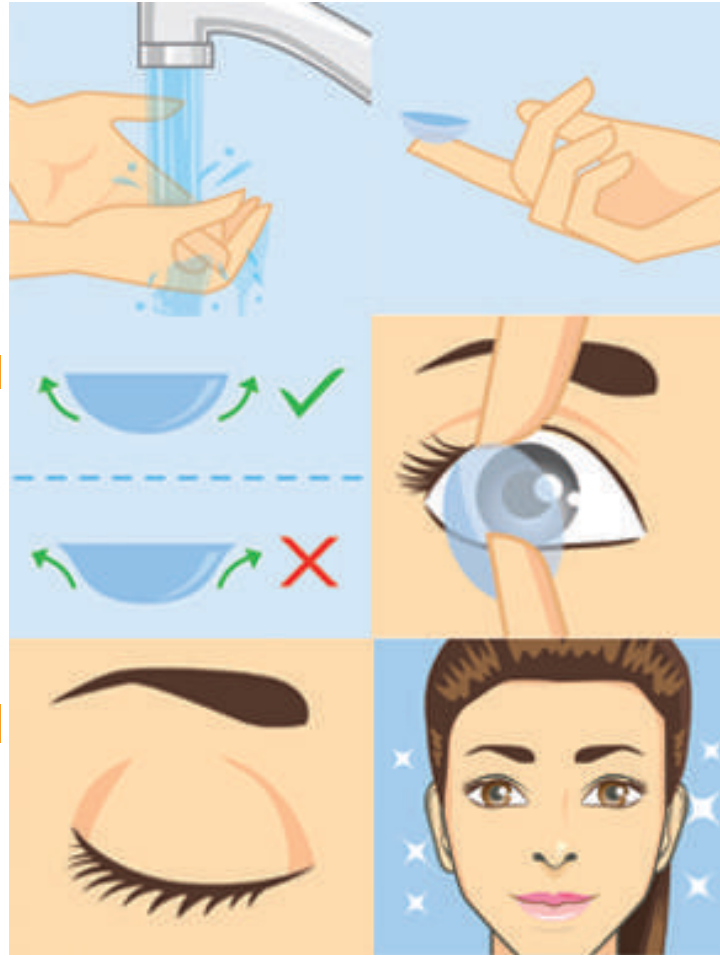

EFECTE SECUNDARE

Dacă nu aveți grijă de lentile, vă pot face ochii să fie iritați, creând senzație de disconfort. Asta poate duce la afecțiuni oculare. Dacă simțiți orice disconfort, vă rugăm să vizitați doctorul dvs..

ÎNGRIJIRE ȘI DEPOZITARE

- Dacă nu purtați imediat lentilele de contact, le puteți depozita într-o cutie de lentile sigilată. Nu stocați lentilele dvs. în soluție salină simplă, aceasta nu va dezinfecța.
- Lentilele pot fi stocate în cutia sigilată până când sunt gata de purtat, până la maxim 30 zile.
- Nu reutilizați soluția veche sau să mai adăugați soluție în cutia dvs. de lentile.
- Nu transferați soluția de lentile de contact în containere mici de călătorii. Asta poate afecta sterilitatea soluției, lucru care poate duce la infecție oculară.
- Nu permiteți vârful sticlei cu soluție să intre în contact cu orice suprafață și țineți sticla închisă când nu o utilizați.
- Dacă vă stocați lentilele în cutie pentru o perioadă extinsă de timp, consultați instrucțiunile lentilei sau a soluției de lentile de contact pentru a determina dacă e potrivită redezinfecțarea lentilelor înainte de purtare. Nu ar trebui să le purtați în niciun caz lentilele după ce au fost depozitate pentru 30 de redezinfecțări.

AVERTISMENT

- Acest produs intră în contact direct cu corneea, vă rugăm discutați cu doctorul dvs. înainte de utilizare. Dacă apar orice probleme, vă rugăm să vă tratați imediat pentru a preveni afecțiuni oculare.
- Purtați conform Orarului de purtare și nu le purtați lentilele de zi în timpul somnului.
- Dacă pachetul este deteriorat în orice fel, NU FOLOSIȚI PRODUSUL!
- Nu schimbați lentilele, mereu folosiți aceeași în același ochi. Lentila corectă trebuie să intre mereu în ochiul drept, la fel cu cel stâng.
- Nu dormiți și nu înnotați când utilizați lentilele. Nu le împrumutați altor persoane.

GARANȚIE

- Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți revendica garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea valorii produsului nepotrivit.
- Ne puteți trimite un email cu numărul comenzii și data achiziției. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data de pe factura produsului.



CONTACT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.